

LEUKOTAPE® K

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das elastische Tapematerial Leukotape® K können Sie von Kopf bis Fuß einsetzen. Um dabei die Atmungsaktivität an den getapten Körperstellen zu gewährleisten, hat die Klebefläche sinusförmige Aussparungen. Darüber hinaus bleibt mit Leukotape® K, das in der Regel mehrere Tage getragen werden kann, die volle Beweglichkeit Ihrer Patienten erhalten. Das Material ist den Eigenschaften der Haut angepasst und besteht aus 93% Baumwolle und 7% Elastan.

- 1 Wellenförmiger Klebmasseauftrag
- 2 Dehnbar
- 3 Schnelles und einfaches Anlegen
- 4 Polyacrylatklebmasse
- 5 Trägermaterial aus Baumwolle



LEUKOTAPE® K

BESTELLINFORMATIONEN

Best.-Nr.	Länge	Breite	Farbe		PZN
Einzelrolle in Faltschachtel					
7297810	5 m	2,5 cm	hautfarben	5/50	01907340
7297811	5 m	5,0 cm	hautfarben	5/50	01907357
7297812	5 m	7,5 cm	hautfarben	5/40	01907363
7297815	5 m	2,5 cm	rot	5/50	01907386
7297816	5 m	5,0 cm	rot	5/50	01907392
7297817	5 m	7,5 cm	rot	5/40	01907400
7297820	5 m	2,5 cm	blau	5/50	01907417
7297821	5 m	5,0 cm	blau	5/50	01907423
7297822	5 m	7,5 cm	blau	5/40	01907446
7297823	5 m	5,0 cm	schwarz	5/50	06110184
7297824	5 m	5,0 cm	hellblau	5/50	06110190
7297825	5 m	5,0 cm	pink	5/50	06110178



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Leukotape® K

Das elastische Tape

FÜR PROFIS UND PRAXIS



- HAUTFREUNDLICH
- DEHNBAR
- LIEFERBAR IN 6 FARBEN



BSN medical GmbH

Schützenstraße 1–3
22761 Hamburg · Germany



UK responsible person:
Essity UK Ltd · Southfields Road
DUNSTABLE · Beds · LU6 3EJ

70472-00612-03 JBR14245.02 09/2022

LEUKOTAPE® K

PROFESSIONELL ELASTISCHES TAPEN

Auf elastisches Tapen mit Leukotape® K – dem besonderen Tapematerial, das sich wie eine zweite Haut dehnt und dabei die volle Bewegungsfreiheit erhält – vertrauen immer mehr Experten in der Praxis. Ob im Leistungssport oder Alltag: Leukotape® K macht das aktive Leben Ihrer Patienten wieder bunt.



LEUKOTAPE® K

ANWENDUNGSHINWEISE

Generell müssen folgende Grundprinzipien und Regeln zur fachgerechten Durchführung des Tapings mit Leukotape® K beachtet werden, um einen optimalen Sitz des elastischen Tapes zu erzielen. Aus diesem Grunde empfehlen wir Patienten, Leukotape® K durch einen Arzt oder Therapeuten anlegen zu lassen:

1 VORBEREITUNG DER HAUT

Die Haut sollte trocken, fettfrei und nicht gereizt sein (z. B. nach intensiver Sonnenbestrahlung). Starke Behaarung erfordert eine Rasur oder Kürzung der Haare. Von einem Einklingenrasierer bzw. „Einmalrasierer“ wird grundsätzlich abgeraten, da er immer zu Hautverletzungen und Epithelschädigungen führt und es bei anschließender Tapeanlage häufiger zu Hautirritationen oder Juckreiz kommen kann.

2 ANLEGEN

Da keine Korrektur der Tapelänge mit Schere nach Anlegen möglich ist, muss das Tape vor dem Kleben auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden. Die Enden bzw. Ecken der Tapeastreifen werden rund geschnitten (bessere Haltbarkeit und längere Tragezeit) und spannungsfrei aufgelegt. Dadurch werden ein vorzeitiges Ablösen der spannungsfreien Ecken und unerwünschtes Aufrollen der Tapeenden vermieden.

Unmittelbar vor der Applikation muss der Release-Liner entfernt werden.

Das Anlegen der Tapes folgt der anatomischen Struktur. Nach der Tapeanlage auf der Haut ist keine Korrektur mehr möglich, da es durch die gute Klebekraft Rückstände des Hautepithel auf dem Acrylatkleber gibt und er nicht erneut gut haften würde. Um auch die wärmeabhängigen Haftungseigenschaften zu unterstützen, mehrfach mit flacher Hand über die fertige Tapeanlage streichen.

3 KONTROLLE

Generell empfiehlt sich nach 2 bis 3 Tagen eine Kontrolle der Tapeanlage und eine Rückmeldung vom Patienten bezüglich der korrekten Anlage.

4 HAUTFREUNDLICHES ABNEHMEN

Insgesamt sollte eine Tapeanlage nicht länger als 5 bis 7 Tage getragen werden. Sinnvoll ist ein Abnehmen der Tapes unter Nässe, z. B. beim Duschen, durch den Patienten selbst. Dafür sollte die Haut gestrafft und das Tape in Haarwuchsrichtung abgezogen werden.

