



Product information

Prophylactic Powder

TOP Minze	SUN436Q
TOP Kirsch	SUN437Q
TOP Zitrone	SUN435Q
PERIO PLUS	SUN438P



Eigenschaften

- Kombiprodukt PERIO PLUS ist für sub- und supragingivale Behandlung mit Polierwirkung zum Patent angemeldet (Innovation in Korngröße und Kristallstruktur führt zu schnellem Behandlungserfolg und Einsparung einer Endpolitur → **Zeit- und Kostenersparnis**)
- nicht kariogene Formulierungen
- klinisch bewährte Rezepturen, als Medizinprodukt zugelassen



Allgemeine Hinweise

Prophylaxe Pulver für die professionelle Zahnreinigung und Biofilm (Plaque)-Entfernung.

Alle Pulver sind besonders fein und gleichmäßig gekörnt. So erzielt man eine selektive Abrasion bei Belägen und arbeitet zugleich schonend für Weichgewebe und Zahnhartsubstanzen.

→ Professionelle Pulver für sub- und/oder supragingivale Behandlung in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich.

Anwendungsbereiche / Indikation

- **TOP**
Der Klassiker für supragingivale Anwendungen entfernt Biofilm (Plaque) und starke Verfärbungen. Bei Bedarf bereiten Sie damit die Zahnoberfläche für verschiedene Behandlungen vor.
- **PERIO PLUS** (zum Patent angemeldet)
Das vielseitigste und nicht kariogene sowie angenehm schmeckende Pulver bei dem eine anschließende Polierung entfallen kann. **Sub- und supragingival** (Indikationen oberhalb als auch unterhalb des Zahnfleischsaumes) am natürlichen Zahn und an Implantaten anwendbar.

MP Klasse I **CE**

Zusammensetzung

Prophylaxepulver TOP:

Natriumhydrogencarbonat Basis

Prophylaxepulver PERIO PLUS:

Tagatose Basis

chemisch-physikalische Daten

Optik: weiße, feine und homogene Pulver definierter Korngröße:

TOP:

mediane Korngröße 40µm, 300g


PERIO PLUS:

mediane Korngröße 15µm, 120g

Vielseitigste und effizienteste Behandlung!

zusätzliche Indikationen:

- Reinigung von Implantatoberflächen
- Schonende Reinigung in der Kieferorthopädie (z.B. Brackets)
- Reinigung der Zähne vor dem Bleaching

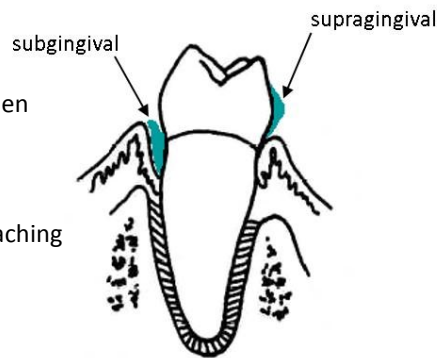

Varianten

Erhältlich in folgenden Geschmacksrichtungen

TOP: Minze, Lemon, Cherry

PERIO PLUS: neutral

Hinweise zur Anwendung

Das entsprechende Pulver je nach Indikation in den Vorratsbehälter des Pulverstrahlgeräts umfüllen. Pulver staubfrei und trocken lagern und nicht mit anderen Pulvern mischen.

TOP : Beachten Sie die Gebrauchsinformation und maximale Füllhöhe der Gerätehersteller. Nicht für die Entfernung von Belägen oder Konkrementen in Zahnfleischtaschen geeignet, ebenso den Pulverstrahl nicht auf das Zahnfleisch oder sonstige Weichgewebe richten. Freiliegendes Dentin und Schmelzkaries dürfen nicht bestrahlt werden, da hier mit höheren Abrasivwerten zu rechnen ist. Komposit-, Kompomer-, Amalgam- und Goldfüllungen dürfen ebenfalls nicht bestrahlt werden, da es zu Aufrauungen kommen kann. Patienten die an chronischer Bronchitis oder Asthma leiden, dürfen niemals mit einem Pulverstrahlgerät behandelt werden. Patienten mit einer natriumarmen Diät (z.B. Bluthochdruck) sollten nicht mit dem Pulver behandelt werden, da es Natriumhydrogencarbonat enthält. Patienten bei denen ein Allergieverdacht gegenüber Aromastoffen besteht, dürfen nicht mit dem Pulver behandelt werden. Patient und Bediener müssen einen Augenschutz tragen. Der Bediener muss eine Maske und Handschuhe tragen. Hochleistungs-Absauggerät verwenden. Geben Sie Vaseline auf die Lippen des Patienten. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Behälter geschlossen halten. Vor Gebrauch gut schütteln!

Gutachten

Unsere Produkte sind nach den neuesten Methoden wissenschaftlich untersucht und getestet (z.B. Korngrößenverteilungsmessungen)

Lieferformen

PROPHY TOP:

300g Flasche weiß mit Adapterverschluss

PROPHY PERIO PLUS:

120g Flasche weiß mit Adapterverschluss

Kontakt

PRISMAN Pharma International AG

Am Stalden 16

4622 Egerkingen

Switzerland

Tel.: +41 (0)62 206 20 60

Fax: +41 (0)62 206 20 69

www.innocid.com

info@prismanpharma.com

Produzent

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18

64653 Lorsch

Germany

PERIO PLUS: Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation und maximale Füllhöhe der Gerätehersteller.

- Subgingivale Anwendung:

Entfernung von periodontalen Biofilmen.

- zusätzliche supragingivale Anwendung bei PERIO PLUS :

Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus.

Patienten, die an chronischer Bronchitis oder Asthma leiden, dürfen niemals mit einem Pulverstrahlgerät behandelt werden. Nicht bei Empfindlichkeit auf Glycin verwenden. Patient und Bediener müssen Augenschutz tragen. Der Bediener muss eine Maske und Handschuhe tragen. Hochleistungs-Absauggerät verwenden. Geben Sie Vaseline auf die Lippen des Patienten. Der Pulverstrahl darf nicht auf Füllungen, Kronen und Brücken gerichtet werden, diese Restaurationen können beschädigt werden. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch. Behälter geschlossen halten. Vor Gebrauch gut schütteln!