



TMS SOFT WIPES

Alkoholische Desinfektionstücher

VAH

IHO



Produktbeschreibung

TMS soft Wipes sind alkoholische Oberflächendesinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form, aldehyd- und QAV-frei. Sie hinterlassen keine Rückstände und bestehen aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen werden.

Anwendungsgebiet

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Da es sich um ein alkoholisches Desinfektionsmittel handelt, müssen die Flächen alkoholbeständig sein. Für alkoholunbeständige Flächen, wie Acrylglas und Polycarbonat, ist die Anwendung nicht zu empfehlen.

Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen. Die Menge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte. Die Tränklösung trocknet rückstandsfrei ab. Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten: 50 g Ethanol

EINWIRKZEIT	1 min.
-------------	--------

TMS SOFT WIPES

Bakterizide	EN 13727 EN 16615	niedrige Belastung	✓
Levurozid	EN 13624* EN 16615	niedrige Belastung	✓
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	✓
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	EN 14476 Virus-4-Felder-Test	niedrige Belastung	✓
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	EN 14348*	niedrige Belastung	✓

* getestet an Referenz Tuch

PRODUKTSORTIMENT UND SPEZIFIKATION

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	GEBINDEART	MAßE	UMKARTON
M2112670 Neutral	1 x 80 Tücher	Flowpack	22 x 20 cm	12 x 80 Tücher
M2113644 Lemon	1 x 80 Tücher	Flowpack	22 x 20 cm	12 x 80 Tücher
M2116037 Apple	1 x 80 Tücher	Flowpack	22 x 20 cm	12 x 80 Tücher

BAuA Biozid Registriernummer

N-118224

Medizinproduktklasse

Ila



TMS SOFT WIPES

Alkoholische Desinfektionstücher

VAH

IHO



Chemisch-physikalische Daten

Farbe farblos
Aussehen klar
Zustand flüssig
pH-Wert (20°C) 7-9
Dichte (20°C) 0,910 – 0,9250 g/ml

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit
24 Monate
Haltbarkeit im Anbruchgebilde
28 Tage
Gebinde nach jeder Verwendung
sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher
verwenden.

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	WERT
Temperaturgrenzen für die kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	[°C]	0 - 40 ¹⁾
Umgebungstemperatur für die dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min. - Max.)	[°C]	20 - 25

¹⁾ Eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24 h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produkts.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen Lesen.

