

DATENBLATT**CLEARTEST D-Dimer zur Anzeige einer Fibrinolyse**

Art.-Nr.: C3 0501-5



Ein zuverlässiger Test bei Verdacht zum Beispiel auf Thrombose oder Lungenembolie

Zu hohe D-Dimer-Werte können auf eine Beinvenenthrombose, Lungenembolie, übermäßige Blutgerinnung (disseminierte intravasale Gerinnung), bösartige Tumore, Leukämien oder eine schwere Leberzirrhose hindeuten. Zu niedrige Werte haben keine klinische Bedeutung.

Hier die Detaildaten zum Test:

Die Nachweisgrenze liegt bei 500 ng/ml.

Auswertung exakt nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Einzelne Portionsfläschchen für die Pufferlösung sind im Kit enthalten,

dadurch keine Verschleppung und für jede Kassette ausreichend Reagenz.

Sie erhalten den CLEARTEST D-Dimer entweder als 1er, 5er oder 10er (ohne Lanzette) Testpackung und zusätzlich pro Test kostenlos eine unserer Variosafe Sicherheitslanzetten (REF: A2 2000).

Wichtiger Hinweis:

Bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz und Atemnot weisen ein erhöhter Wert für D-Dimer und das Fehlen typischer Herzmarkerveränderungen auf eine Lungenembolie hin.

Bei der Spaltung des Proteins Fibrin, das für die plasmatische Blutgerinnung eine entscheidende Bedeutung hat, entsteht das Produkt D-Dimer. Setzt im Körper eine Blutgerinnung ein, steigt die Konzentration des D-Dimers im Blut. Dieser Test ermöglicht den Ausschluss einer Lungenembolie (LE), tiefer Venenthrombosen (TVT) oder einer disseminierten intravasalen Koagulopathie (DIC). Beim D-Dimer ist zu beachten, dass die diagnostische Aussage des Testes mit zunehmendem Alter des Patienten sinkt. Wissenschaftler haben eine Formel zur Hochrechnung des Cut-off entwickelt: "Alter in Jahren x 10 Mikrogramm pro Liter", bei Werten über 500 Mikrogramm pro Liter ist jedoch immer eine weiterführende Diagnostik notwendig.

Nur für medizinisches Fachpersonal

Schnellinfo



PLASMA



BLUT



10 MIN



GERMANY

DATENBLATT

CLEARTEST D-Dimer zur Anzeige einer Fibrinolyse

Art.-Nr.: C3 0501-5

| Typ | PZN | REF | VE |
|---------|----------|------------|----------|
| D-Dimer | 06690862 | C3 0501-10 | 10 Teste |
| D-Dimer | 06690856 | C3 0501-5 | 5 Teste |
| D-Dimer | 06690833 | C3 0501-E | 1 Test |

| Artikel | REF | Menge | Einzelpreis | Gesamtbetrag |
|---------|-----|-------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>